

Quick Start


medical Body Composition Analyzer seca 525

- Sicherheitshinweise • Safety precautions
- Consignes de sécurité • Avisos de seguridad

1.




2.

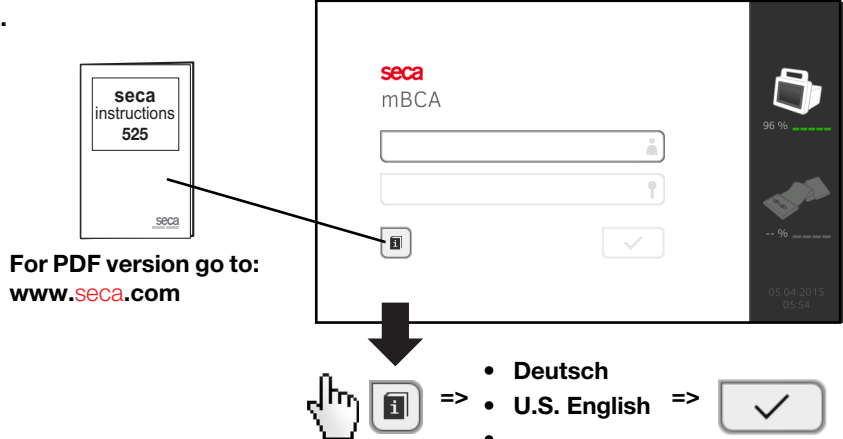

For PDF version go to:
www.seca.com

- Deutsch
- U.S. English
- ...

- Lieferumfang • Scope of Supply
- Éléments livrés • Volumen de suministro

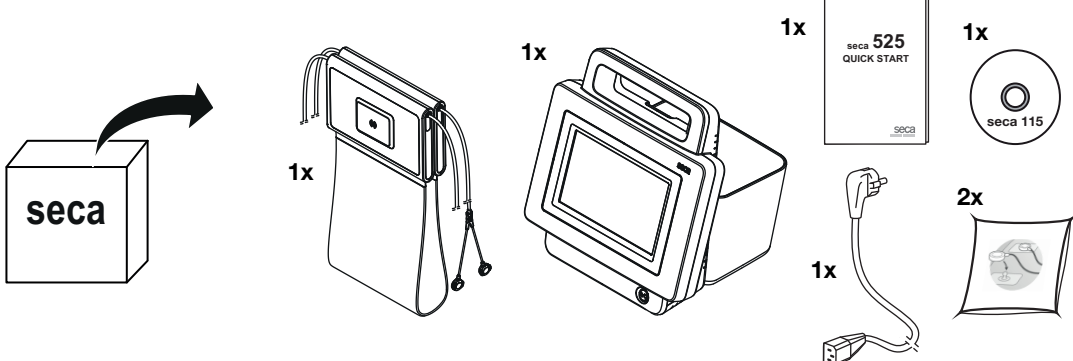

1x

1x

1x

1x

2x

- seca analytics 115 installieren • Installing seca analytics 115
- Installer seca analytics 115 • Instalar seca analytics 115




seca 115
QUICK
Installation
Guide


seca 115

seca
analytics
115


- Messmatte in Köcher einhängen • Placing measuring mat in storage compartment
- Placer la toise-tapis dans l'étui de rangement • Colocar la estera de medición en el soporte

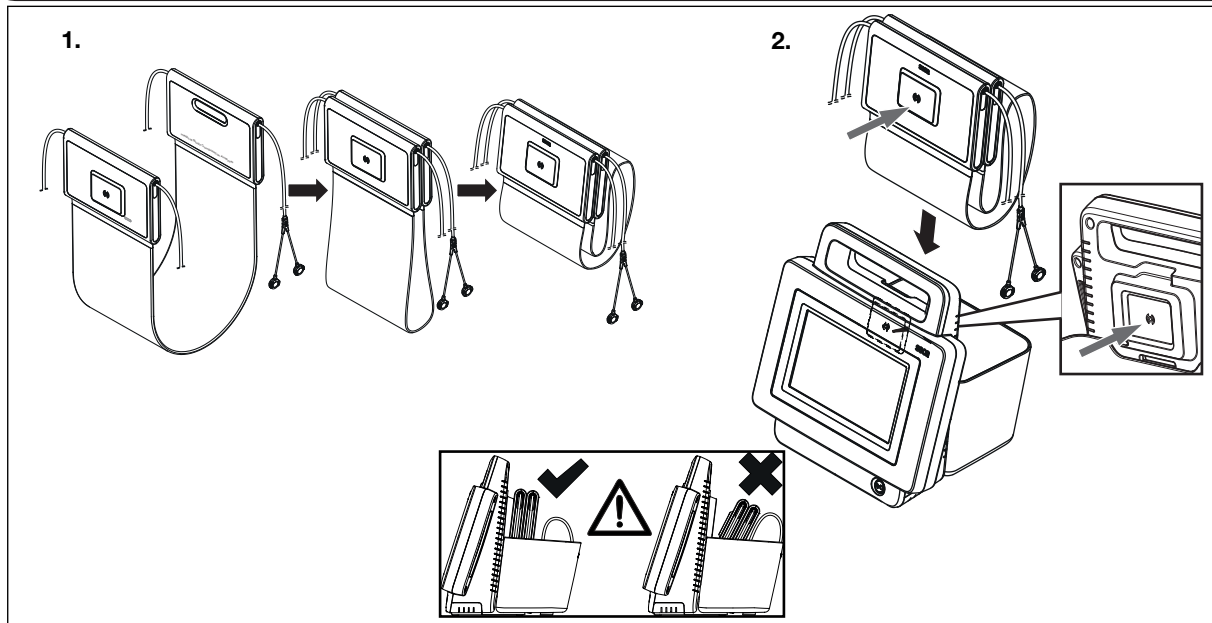

- Akkus laden • Charging Batteries
- Charger les piles • Cargar las baterías

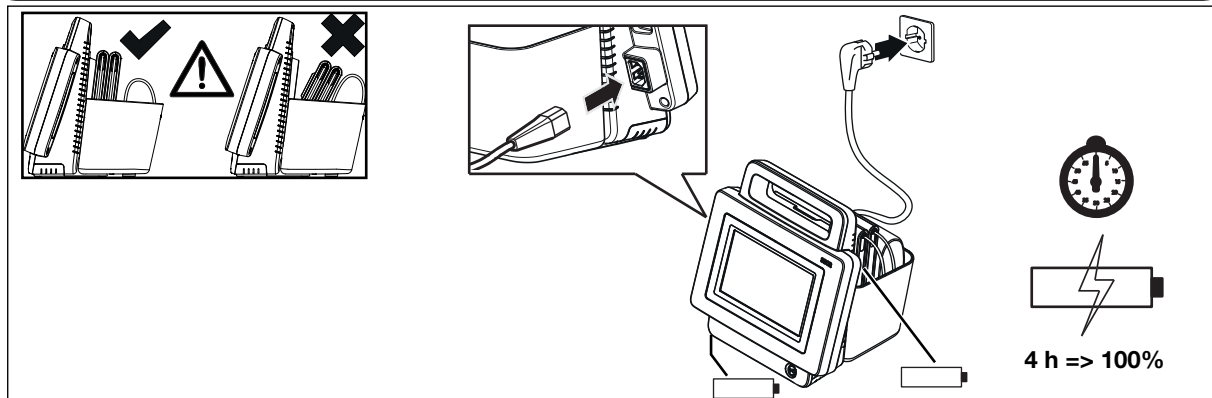

- System starten • Starting the system
- Démarrer le système • Iniciar el sistema

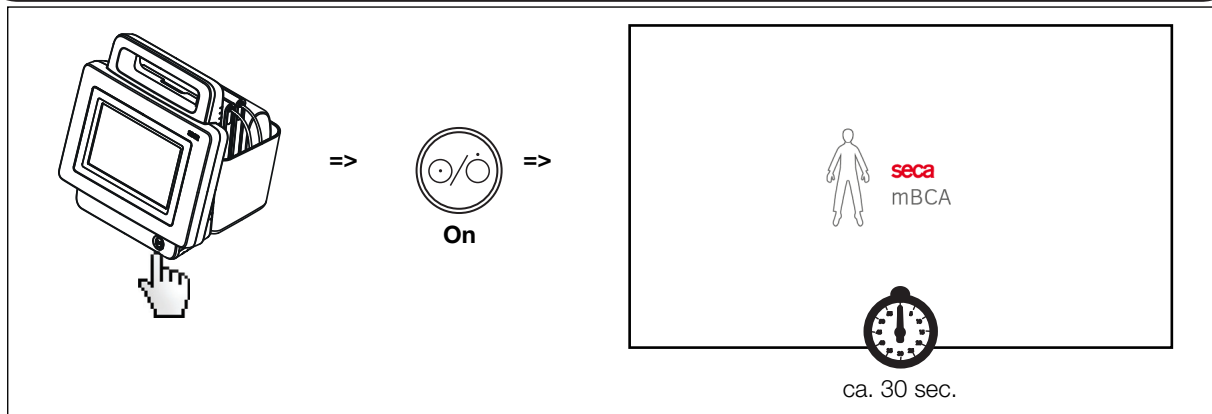


- Nach erstem Systemstart: Datum/Uhrzeit einstellen • Following initial system start: set Date/Time
• Après le démarrage initial du système : régler la date/l'heure • Después del primer inicio del sistema: ajustar fecha/hora

1.  =>  => 

2.  =>  => 

3. 

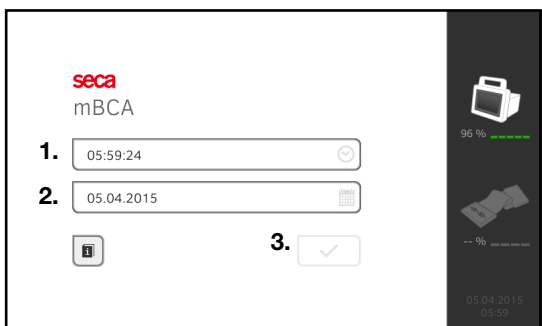

- Nach jedem Systemstart: Login • Following every System start: Login
• Après chaque démarrage : login • Después de cada inicio del sistema: iniciar sesión





1.  => **admin**

2.  => **1357** => 

1.  => • **demouser1**


2.  => • **1234** => 

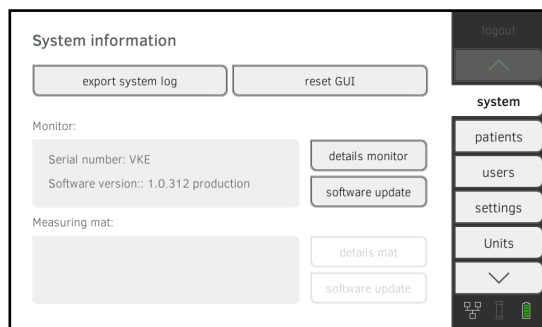

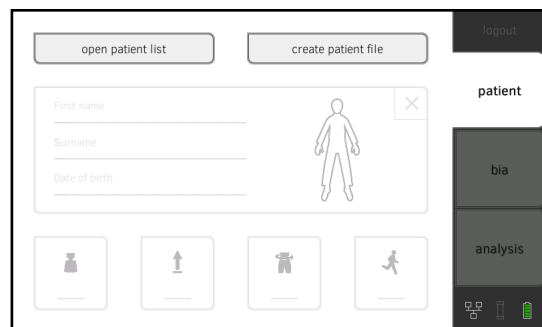

- Gebrauchsanweisung ansehen • View instructions for use
- Accéder au mode d'emploi • Consultar las instrucciones de uso




For PDF version go to:
www.seca.com

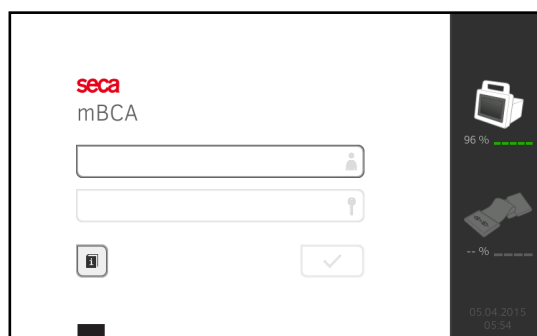

- Deutsch
- U.S. English
- ...



Link

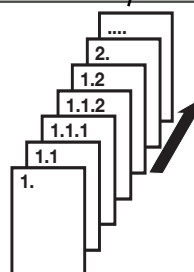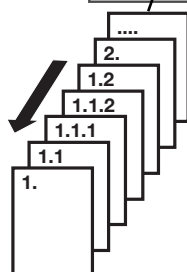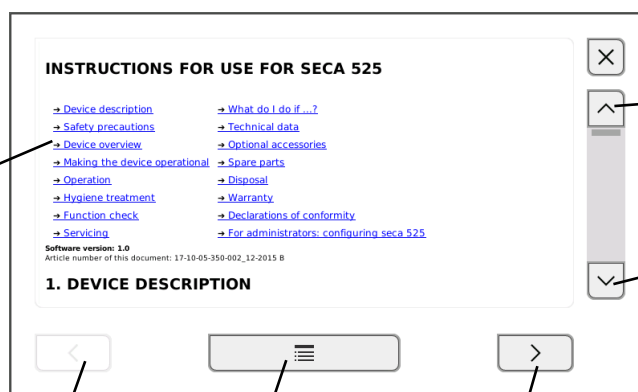

This device uses software known as „free“ or „open source“ software (FOSS). For details go to www.seca.com/opensource.

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3- 25
22089 Hamburg • Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska

seca middle east

seca brasil

seca suomi